



| Tuotekortti |

FYSICON COMFORT-33

Hygieniapatja

Laadukas uritettu hygieniapatja

Merivaaran koodit 941 / 942 / 943 / 944

Käyttökohde


- Fysicon Comfort-33 on erinomainen peruspatja sairaaloihin, palvelutaloihin ja kotisairaanhoidon.
- Painosuositus < 150 kg. Painavan henkilön ja 24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi (suositus julkisessa terveydenhoidossa 3-5 vuotta).

Tuotteen rakenne

- Sisus on E-33PS / D33145 (33 kg/m³) paloturvallinen jämäkkä vaahtomuovi, jonka toisella puolella on vyöhykeuritus.
- Päällinen on polyuretaanipinnoitettu sininen hygieniakangas, joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä. Vetoketju kahdella sivulla, suojattu tippaläpällä.

Hyödyt

- Urituksen ansiosta patjasta on valittavissa pehmeämpi tai napakampi puoli. Lantion alueella on matalammat urat, joten se on kestävä. Olkapään kohdalla syvemmät urat tekevät kylkiasennosta miellyttävän. Uritus parantaa myös ilmastoituvuutta ja helpottaa patjan taivutusta istuma-asentoon.

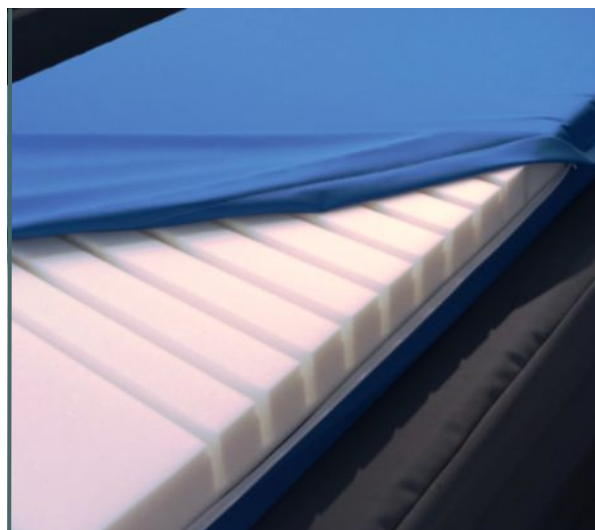

Puhdistus ja huolto

- Desinfiointi pyyhkimällä ohjeen mukaan laimennetulla kloori-amiini- tai alkoholipohjaisella aineella tai etanoli/ kloori max 1000 ppm, huuhtelee hyvin ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa päällisen pesu 70-95°C nurinpäin, varovainen rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa.
- Käännä patjaa säännöllisesti. Vaihda rikkoutunut päällinen uuteen.
- Sängyssä tulisi olla säle- tai reikäpohja.

Paloluokitus, CE & kotimaisuus

Syttyvyysluokka SL1, liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Patjalla on CE-merkki ja Suomalaisen työn liiton avainlippu-tunnus.

Koko

Vakiokoot 75*200*13, 80*200*13, 85*200*13, 90*200*13 cm. Muita kokoja tilauksesta.

