



| Tuotekortti |

Fysicon MiniMAX 13

Antidecubitus patja

Uusi antidecubituspatja, joka sopii kaikille painoluokille

Merivaara koodit 948 / 964 / 949 / 965

Käyttökohde

- Fysicon Mini-MAX on pintapaineita vähentävä erikoispatja sairaaloihin, palvelutaloihin ja kotisairaanhoidon.
- Patja soveltuu matalan ja keskiriskin pitkäaikaipotilaille.
- Tuote sopii ilman säätöjä eripainoisille käyttäjille 40-150 kg ja antaa sopivan tuen ja pehmeuden.

Tuotteen rakenne

- Mini-MAX patjan sisus koostuu kolmesta kerroksesta: pinnassa on pehmeästi muotoutuva viskoelastinen kerros, keskellä ja pohjassa asteittain tukeaa lisäävät kerrokset.
- Päällinen on sininen hygieniakangas, joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä. Vetoketju kahdella sivulla, suojattu tippaläpällä.

Hyödyt

- Sama patja soveltuu hyvin eripainoisille, koska pinta on pehmeä ja pohjakerrokset antavat tukeaa painaville käyttäjille.
- Hoitolaitokset säästävät aikaa ja kustannuksia, kun kaikki potilaat voidaan hoitaa samalla patjatyypillä



foam
for care



Puhdistus ja huolto

- Desinfiointi pyyhkimällä ohjeen mukaan laimennetulla kloori-amiini- tai alkoholipohjaisella aineella tai etanoli/ kloori max 1000 ppm, huuhtelee hyvin ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa päällisen pesu 70-95°C nurinpäin, varovainen rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa.
- Käännä patjaa säännöllisesti. Vaihda rikkoutunut päällinen uuteen.
- Sängyssä tulisi olla säle- tai reikäpohja.

Paloluokitus, CE & kotimaisuus

Syttyvyysluokka SL1, liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Patjalla on CE-merkki ja Suomalaisen työn liiton avainlippu-tunnus.

Koko

Vakiokoot 75*200*13, 80*200*13, 85*200*13, 90*200*13 cm, muita kokoja tilauksesta.