



| Tuotekortti |

MERIVAARA BASIC

Hygienipatja

Perushygienipatja

Merivaaran koodit 932 / 967 / 934 / 968

Käyttökohde

- Merivaara Basic hygienipatja sopii hyvin sairaaloihin, palvelutaloihin ja kotisairaanhoidon aktiivisesti liikkuville potilaille.
- Painosuositus < 150 kg. Painavan henkilön ja 24h/vrk käytössä käyttöikä on normaalia lyhyempi (suositus julkisessa terveydenhoidossa 3-5 vuotta).

Tuotteen rakenne

- Sisus E-33PS / D33145 (33 kg/m³) paloturvallinen kimmovahtomuovi, sileä levy.
- Päällinen polyuretaanipinnoitettu sininen hygieniakangas, joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä. Vetoketju kahdella sivulla, ilman tippaläppää.

Hyödyt

- Edullinen ja helppohoitoinen patja.
- Nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä, kun päällisen puhdistus onnistuu ilman sen irroittamista.



Puhdistus ja huolto

- Desinfiointi pyyhkimällä ohjeen mukaan laimennetulla klooriamiini- tai alkoholi-pohjaisella aineella, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa päällisen pesu 70-95°C nurinpäin, varovainen rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa.
- Käännä patjaa säännöllisesti tasaisen kulumisen varmistamiseksi. Vaihda rikkoutunut päällinen uuteen.
- Sängyssä tulisi olla säle- tai reikäpohja.

Paloluokitus, CE & avainlippu

Syttyvyysluokka SL1, liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Tuotteella on CE-merkki sekä Suomalaisen työn liiton avainlipputunnus.

Koko

Vakiokoot 75*200*12, 80*200*12 ja 85*200*12 cm.

Muita kokoja tilauksesta.

