

OPTIMA™

Lojer Merivaara Optima synnytyssänky



LOJER®

For Easy
Care



OPTIMA™



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Mahdollistaa monipuoliset synnytysasennot
2. Kätilö pääsee lähelle synnyttäjää kaikissa asennoissa
3. Tuotteesta on kolme eri mallia erilaisiin tarpeisiin

Ergonominen, turvallinen ja siirreltävä Optima synnytyssänky on tarkoitettu kaikkiin synnytyksen vaiheisiin, ja myös erikoishoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. Optima on säädettävissä pitkäksi vuoteeksi kevyesti ja helposti. Uudistetun Optima sängyn suunnittelussa on keskitytty erityisesti tuotteen hyvään ergonomiaan, turvallisuuteen sekä liikuteltavuuteen.

Optimaa on mahdollista säätää moniin eri synnytys- ja lepoasentoihin synnyttäjän olon helpottamiseksi ja optimaalisten olosuhteiden luomiseksi. Kätilö pääsee lähelle synnyttäjää kaikissa asennoissa, mikä edistää turvallisuutta ja ergonomiaa. Sängyssä on Trendelenburg-säätö. Optima on helposti puhdistettavissa. Sänkyä voidaan käyttää myös kuljetukseen sairaalan sisällä sekä se toimii synnytystuolina.



Jalkaosan kallistus lisää asennon vaihtelumahdollisuuksia (vain 4-moottorinen malli). Jalkaosaa voidaan siirtää sisään/ulos kaikissa malleissa.



Erittäin kevyttä mutta tukevaa jalkaosaa on helppo liikutella ja liu'uttaa sängyn alle yhdessä patjan kanssa, mikä nopeuttaa työskentelyä ja tekee siitä entistä ergonomisempaa. Korkeussuunnassa säädettävän jalkaosan kuormitettavuus (SWL) on 80 kg.



Sängyn alla oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas voidaan työntää jalkaosan alle ja vetää tarvittaessa taas ulos.



Sekä polvitaivuet että tukikaari voidaan kiinnittää istuinosaan ainutlaatuisella patentoidulla lukitusmekanismilla. Lisäksi jalkatukia voidaan käyttää kiinnitettynä jalkaosaan, mikä mahdollistaa erilaisia asentoja.



Sähkötoiminen ja käsikäyttöinen Trendelenburg parantaa potilasturvallisuutta.



Uudelleen muotoiltu, tyylikäs ja entistä hygieenisempi kaidevaihtoehto.



4-moottorinen Optima

Sähkökäyttöiset toiminnot:

- Korkeussäätö
- Selkäosan säätö
- Jalkaosan korkeussäätö
- Trendelenburg-säätö

Käsi­käyttöiset toiminnot:

- Jalkaosan siirto sisään/ulos
- Jalkaosan kallistus

Lisäturvatoiminnot:

- Käsi­käyttöinen Trendelenburg-säätö
- Selkäosan käsi­käyttöinen pikavapautus

2-moottorinen Optima

Sähkökäyttöiset toiminnot:

- Korkeussäätö
- Selkäosan säätö

Käsi­käyttöiset toiminnot:

- Jalkaosan siirto sisään/ulos
- Trendelenburg-säätö
- Selkäosan pikavapautus



Hydraulinen Optima

Käsi­käyttöiset toiminnot:

- Selkäosa (kaasujousiavusteinen)
- Korkeus (hydraulipoljin)
- Trendelenburg-säätö
- Jalkaosan siirto sisään/ulos

ESIMERKKEJÄ SYNNYTYSASENNOISTA



Istuma-asento

Hyödyt:

- Tehokas, ergonominen ponnistusvaiheen asento
- Optimoii painonjakauman ja auttaa lantiota avautumaan synnyttämisen helpottamiseksi

Optiman ominaisuudet:

- Muotoillut jalkatuet
- Käsikahvat ponnistusten tehostamiseksi
- Jalkaosassa runsaasti säätömahdollisuuksia synnytyksen edistämiseksi ja kättilön työergonomian parantamiseksi



Pystyasento ja tukikaari

Hyödyt:

- Optimoii painonjakauman ja auttaa lantiota avautumaan synnyttämisen helpottamiseksi
- Lantion alueen rentoutuminen helpottaa synnytystä
- Toimii myös yhdessä esimerkiksi voimistelupallon kanssa

Optiman ominaisuudet:

- Tukikaari käsivarsien tukena
- Sisään liukuva jalkaosaa tuo lisätilaa
- Tukikaarta voidaan käyttää myös kohottautumistukena



Lateraalinen asento

Hyödyt:

- Helpottaa rentoutumista supistus- ja ponnistusvaiheiden välillä
- Vähentää painetta lantionpohjan alueella ja lisää kohtuun ja sikiöön suuntautuvan veren virtausta
- Ergonominen asento kaiken kokoisille äideille

Optiman ominaisuudet:

- Jalkatuet säädettävissä moneen asentoon
- Kätevä patentoitu lukitusmekanismi



Polviasento

Hyödyt:

- Vähentää painetta pallean alueella ja edistää veren virtausta supistuviin lihaksiin
- Helppo löytää mahdollisimman mukava lantion asento

Optiman ominaisuudet:

- Istuin- ja selkäosa säädettävissä moniin asentoihin
- Sisään liukuva jalkaosu tuo lisätilaa potilaan ja synnytyssängyn ympärille



Lisävarusteet kaikille malleille



Polvivaivatuettu, pari
A23553



Jalkatuettu
A42559000



Nesteenantoteline
4-koukkuinen 100000499



Kohottautumisteline
A41884100



Tukikaari
A42749500



Sivukaiteet
A42200100 4-moottorinen malli
A42801000 2-moottorinen + hydr.



Sivukaiteet
A42718200 4-moottorinen malli
A42750700 2-moottorinen + hydr.



Sängynpäätä, taittuva
A41935200 4-moottorinen malli
A41982900 2-moottorinen + hydr.



Sängynpäätä
100009890 4-moottorinen malli
100009990 2-moottorinen + hydr.



Monitoritaso 128009769



Kori patjasarjalle
10003974



Potilaspaperiteline
128009784



Koukku sähköjohdolle
A41987307



Jalkaohjain
4-moottoriseen malliin
A42471800



Potilaspaneeli ja alusvalo 4-moottoriseen malliin
A43192000



**Ohjauspaneeli ACO
(4-moottorinen malli)**
A42471700
Mahdollisuus lukita
sähkötoimisia säätöjä.



**Ohjauspaneeli ACO
(2-moottorinen malli)**
A42964600
Mahdollisuus lukita
sähkötoimisia säätöjä.



Jalkaohjain
2-moottoriseen malliin
A42965600



Potilaspaneeli, lukuvalo ja alusvalo 2-moottoriseen malliin A42964800



Potentialintasaus A41988100



Tekniset tiedot ja ominaisuudet			
Malli	Hydraulinen	2-moottorinen	4-moottorinen
Kokonaisleveys	1030 mm	1030 mm	1000 mm
Makuutason leveys	780 mm	780 mm	780 mm
Kokonaispituus min - max	1520 - 2110 mm	1520 - 2110 mm	1650 - 2210 mm
Makuutaso min - max	1320 - 2010 mm	1320 - 2010 mm	1300 - 2210 mm
Korkeussäätö	570 - 935 mm	590 - 955 mm	580 - 955 mm
Potilaan enimmäispaino	190 kg	190 kg	190 kg
Kuormitettavuus (SWL)	230 kg	230 kg	230 kg
Jalkaosan kuormitettavuus (SWL)	-	-	80 kg
Trendelenburg	12°	12°	12°
Selkäosan säätö	0 - 60°	0 - 70°	0 - 75°
Jalkaosan korkeussäätö	-	-	0 - 250 mm
Jalkaosan kulmasäätö	-	-	0 - 16°
Pyörät	Keskuslukittavat 150 mm jarrukaarella	Keskuslukittavat 150 mm jarrukaarella	Keskuslukittavat 150 mm jarrukaarella
Käsiohjain	Ei	Kyllä	Kyllä
Paino	114 kg	118 kg	165 kg
Valmistusmaa	Suomi	Suomi	Suomi
CE-merkitty	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tekniset vakio-ominaisuudet:

- Rungon väri: maalattu hopea
- Gyneallas 12 litraa
- Keskuslukitus
- Sisään/ulos työnnettävä jalkaosaa (4-moottorisessa myös kallistus)
- Lisävarustelukko polvituelle
- 2- ja 4-moottoriset mallit sisältävät akun
- Saatavilla erikseen Optimaan suunnitellut patjat, joiden päällinen on PU-pinnoitettua hygieenistä kangasta ja sisus vaahtomuovia (40 kg/m³)



© Lojer Group 2023. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.